



Science. Results. Trust.

Science. Results. Trust.

CO₂RE

חידוש פני העור
בטכנולוגיית CO₂
פרקציונאלי

Syneron®

CANDELA®

info@syneron.com | www.syneron-candela.com

Syneron®

CANDELA®

סינרון קנדלה

* This brochure is not intended for use in the U.S. market.
© 2013. All rights reserved. Motif, Syneron, the Syneron logo and elos are trademarks of Syneron Medical Ltd. and may be registered in certain jurisdictions. elos (electro-optical synergy) is a proprietary technology of Syneron Medical. PB80511HE

”אחרי טיפול אחד בלבד, אני מרגישה
שהפנים שלי נראות משמעותית טוב יותר -
עם מראה צעיר, חלק ומוצק יותר. אני אסירת
תודה עבור הטיפול.”

גל. אנגליה



חידוש פני העור בטכנולוגיית CO₂ פרקציונאלי CO₂RE

מהו מכשיר CO₂RE?

CO₂RE הוא מכשיר לייזר CO₂ לחידוש פני העור. הטיפול נעשה באמצעות לייזר פרקציונאלי, כלומר האנרגיה מועברת לעור במטריצה של נקודות. מבנה ייחודי זה מאפשר טיפול מהיר ונוח יותר למטופל בהשוואה לטכנולוגיות מסורתיות לחידוש מראה פני העור - ומאפשר חזרה מהירה יותר לפעילות שגרתית. ל-CO₂RE תוצאות מוכחות במיצוק העור ושיפור המרקם, העלמת נזקי שמש ונזקי גיל, החלקת קמטוטים, קמטים והעלמת צלקות. ניתן לווסת את עוצמת הטיפול בהתאם לעומק הטיפול הרצוי. התוצאות מראות שיפור דרמטי:

- במיצוק העור ובמרקם העור
- בנזקי שמש ובהחלקת קמטים וקמטוטים
- בהעלמת צלקות, לרבות צלקות אקנה

האם טיפול במכשיר CO₂RE מתאים עבורי?

הטיפול מתאים במיוחד לגילאי 30 ומעלה, הסובלים מנזקי חשיפה לשמש, כתמי גיל, קמטוטים וקמטים, בעיות מרקם, צלקות אקנה או הפרעות אסתטיות אחרות. זהו הטיפול האידיאלי להשגת מראה עור צעיר יותר ללא זמני ההחלמה הממושכים הכרוכים בטיפול לייזר CO₂ רגילים.

כיצד מתבצע הטיפול במכשיר CO₂RE?

טרם הטיפול במכשיר מורחים את האזור המטופל בקרם מאלחש, אשר מסייע להגביר את נוחות הטיפול למטופל. אם נעשה טיפול יותר אגרסיבי, הרופא המטפל יכול להמליץ על זריקת אלחוש לאזור המטופל, על תרופה מאלחשת לבליעה או על תרופת הרגעה למשך הטיפול. ניתן להשתמש במשככי כאבים על מנת להפחית את אי הנוחות בימים שלאחר הטיפול.

האם הטיפול במכשיר CO₂RE בטוח?

כן. יש להתייעץ עם הרופא המטפל לגבי מאפייני העור האישיים על מנת להפחית את הסיכוי לתגובות לא רצויות.

לכמה טיפולי CO₂RE אצדק?

על פי רוב ניתן להבחין בשיפור משמעותי כבר לאחר טיפול בודד בשבועות שלאחר הטיפול ניתן יהיה להבחין במראה עור רך, חלק ומוצק יותר. קמטוטים, קמטים, כתמי שמש ומרקם העור יראו שיפור מיידי.

כמה זמן יחזיקו מעמד תוצאות הטיפול?


טיפול CO₂RE שומרים על תוצאות הטיפול בדומה לפרוצידורות כירורגיות. עם זאת, מאפיינים אישיים כגון בריאות כללית, גיל והרגלי טיפוח העור יכולים להשפיע על תוצאות הטיפול לאורך זמן.

כיצד אחוש בתום הטיפול?

בשעות הראשונות לאחר סיום הטיפול התחושה דומה לכווית שמש. תהליך התחדשות העור כולל התקלפות של העור באזור הטיפול במהלך 7-10 ימים לאחר הטיפול.

האם עליי לנקוט באמצעי זהירות בעקבות הטיפול?

הרופא המטפל עשוי להמליץ על טיפול אנטיביוטי מניעתי וקצר טווח למניעת הווצרות דלקת באזור המטופל. מומלץ מאד למרוח קרם מזין ולהגן על העור בקרם הגנה בעת חשיפה לשמש בשבועות ובחודשים שלאחר הטיפול.

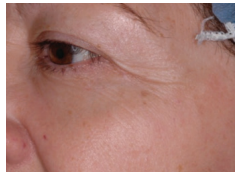

לפני 4-6 שבועות אחרי טיפול אחד



לפני



לאחר 3 טיפולים



לפני



לאחר טיפול אחד



לפני

צילום: Alan Braun, MD

צילום: Alan Braun, MD